

SARS-CoV-2

Ressourcenschonender Einsatz von FFP-Masken



Die **Wiederverwendung** einer **FFP-Maske** muss mit großer Vorsicht geschehen, da die **Außenseite** der benutzten Maske **potenziell erregend** ist.

Wenn die Maske erneut aufgesetzt wird, gilt es, eine **Kontamination** im Gesicht (Nase, Mund & Augen) zu **vermeiden**.

8 Tipps für die Wiederverwendung von FFP-Masken:

1.

• Beim **Absetzen** der FFP-Maske darf die **Innenseite nicht kontaminiert** werden.

2.

• Die FFP-Maske muss nach Verwendung **trocken** an der Luft **aufbewahrt** werden.

3.

• Die **Ablage** der benutzten FFP-Masken muss in einem **abgegrenzten und definierten Bereich** erfolgen.

4.

• Tragen von hygienisch einwandfreien und unbenutzten **Handschuhe vor einem erneuten Aufsetzen**.

5.

• Bei erneuten Anziehen der Maske darf nicht die **Innenseite** des Filtervlieses **nicht berührt** werden!

6.

• Benutzte Einweg-FFP Masken dürfen **nicht gereinigt** oder **desinfiziert** werden!

7.

• **Desinfektion der Maskenablage unmittelbar nach Entnahme** der FFP-Maske.

8.

• Bei **Kontamination** oder **Durchfeuchtung** darf die FFP-Maske **nicht wiederverwendet werden!**

Das **RKI** betont, dass die FFP-Masken **streng personenbezogen innerhalb einer Schicht wiederverwendet** werden können!